



Lohmann & Rauscher

Lenkideal®

obinadlo s krátkým tahem

- plně hrazeno VZP



Použití

- Komprimující fixace krytí ran
- Kompresie končetin ve flebologii
- Profylaxe trombózy před, během a po operaci
- Podpora a odlehčení při distorzích a kontuzích, jakož i sportovní bandáže
- Léčba zánětu šlachového pouzdra

Vlastnosti

- Podélná elasticčnost (cca 90 %)
- Trvale pružné
- Prodyšné
- Obvaz nepatrně zvyšuje objem končetiny
- Tkané okraje
- Barva: bílá

Složení výrobku

64 % bavlna, 34 % polyamid, 2 % elastan


OBINADLA	balení v ks	rozměr v cm	REF	kód VZP	
LENKIDEAL krátkotažné obinadlo 5 m	jednotlivě baleno	10/100	6	14 581	0081037
		10/140	8	14 582	0081038
		10/120	10	14 583	0081039
		10/120	12	14 584	0081040
		10/120	15	14 585	0081041
	volně v kartonu	10/140	4	19 580	
		10/100	6	19 581	
		10/140	8	19 582	
		10/120	10	19 583	
		10/120	12	19 584	
	10/120	15	19 585		
	10/60	20	19 586		



Lohmann & Rauscher

Technika bandážování

Krátkotažné elastické obinadlo je nevhodnější přikládat ráno, dříve než pacient začne chodit a končetina je s minimálním otokem. Obvykle používáme šíři 8 – 10 cm. Obinadlo vineme vzhůru po končetině, základní otáčka může být variabilní. Obrázky názorně ukazují vinutí obinadla od nártu přes prsty a od kotníku směrem vzhůru. Při vinutí je nutné dbát na to, aby maximální tlak bandáže byl v oblasti kotníků, u osob se štíhlými kotníky vkládáme pěnový kompres za kotník. Nad kotníky se tlak začíná zmírňovat, takže tlak pod kolenem je asi poloviční než v oblasti kotníků. Obinadlo se nesmí vázat řídce, vinutí musí překrývat nejméně z jedné poloviny otáčku předchozí. Pod kolenem se obinadlo pevně přichytí náplastí.

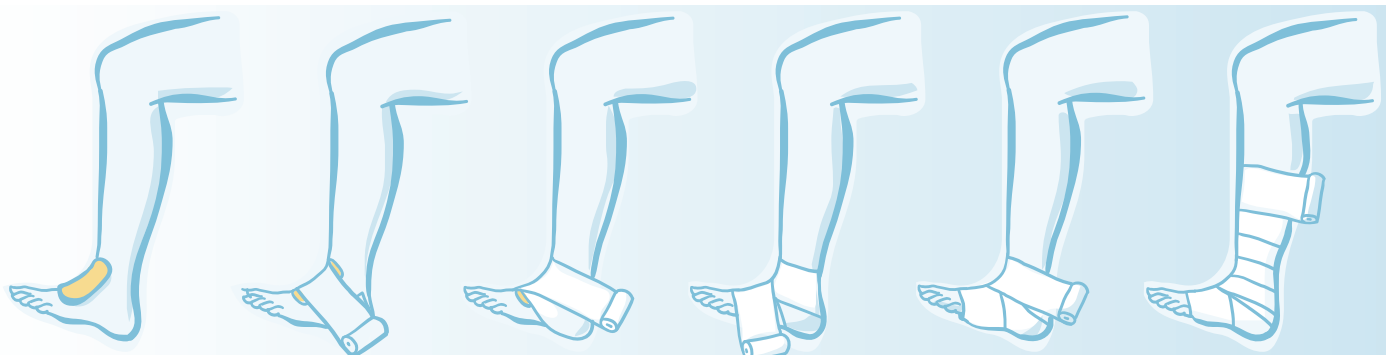

1. Maximální dorzální flexe, nárt podkládáme vatou.

2. První otáčka: pata – nárt – pata.

3. Druhá otáčka: proximálním směrem, otáčky obvazu se těsně překrývají.

4. Třetí otáčka: přes nárt na nohu.

5. Hlavu obvazu vedeme opět vzestupně těsně proximálně od paty.

6. Při vzestupných otáčkách přimodelujeme obvaz (na distálním bérce vedeme otáčky pevněji a hustěji).